

Case : 173

充電コードをさしたまま走行したことで切れてしまい、びっくりして利用者がバランスを崩しそうになる

場面の説明

充電コードを抜き忘れたまま走行したため、充電コードが根元から切れた衝撃にびっくりして利用者がバランスを崩した



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

あわてて出かけようとしたのでしょうか？車いすの故障にもつながる事例で「うっかりミス」が強く疑われますが、最近の製品では、コンセントに差し込まれた状態でスイッチを入れるとアラーム音が鳴るなど、安全対策も進んでいます。このような人為的ミスから事故を防ぐ観点からも、安全対策の有無を確認し、選定の基準に加えることが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：充電中であることを忘れていた
- 人：周りをよく確認せずに走行してしまった
- モノ：充電コードがコンセントに差し込まれていても走行できる構造だった
- モノ：充電コードが差し込まれているとアラームが鳴るなどの安全対策が施されていない
- 環境：充電コードが他のモノで隠れて見えなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 173

充電コードをさしたまま走行したことで切れてしまい、びっくりして利用者がバランスを崩しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

充電コードを抜き忘れたまま走行したため、充電コードが根元から切れた衝撃にびっくりして利用者がバランスを崩した



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ