

Case : 185

運搬のためボードを持つとしたところ、外れて転倒しそうになる

場面の説明

ベッドを動かそうとして、ボードをつかんで持ち上げようとしたところ、ボードが抜けてしまい転倒しそうになった



利用シーン	 その他
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

多くのベッドでは、洗髪などの目的でヘッドボードやフットボードが簡単に取り外せるような構造になっています。ベッドを熟知した人であれば、運搬前にロックを確認するなど安全を確保するでしょうが、在宅では家族がベッドを移動する場面もありますので、注意を喚起することが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：ベッドの正しい運搬方法を理解していなかった

管理：ボードがしっかりと固定されていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 185

運搬のためボードを持とうとしたところ、外れて転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

ベッドを動かそうとして、ボードをつかんで持ち上げようとしたところ、ボードが抜けてしまい転倒しそうになった

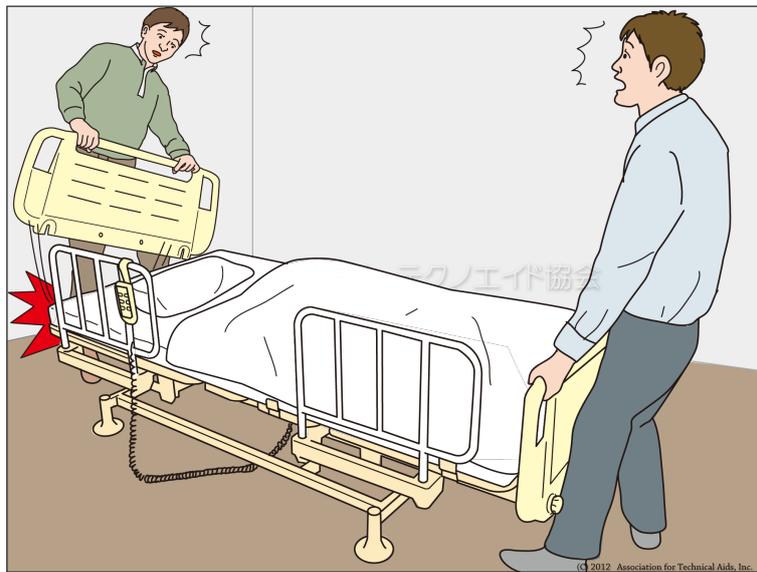

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ