


Case : 20

電源を切り忘れて、降りるときに本体が動き出し、転倒しそうになる

### 場面の説明

降りようとハンドルに手をかけたところ誤ってアクセルレバーを押してしまい急発進、身体ごと持っていかれてしまった

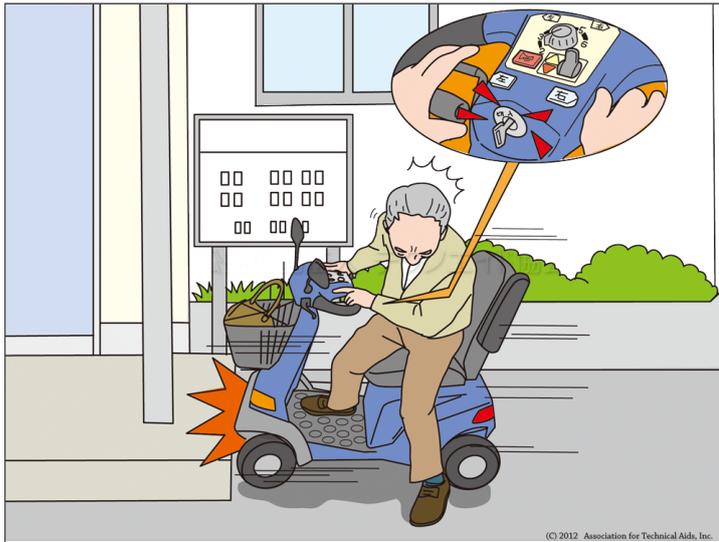

利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

降車前に電源を切ることを習慣化することが必要です。乗降の際にはハンドルを手すり代わりにする人が多いので、アクセルレバーを誤操作しないように心がけましょう。また、ハンドルを手すり代わりにしないと立ち上がれないような人では、このような危険がさらに増すと思われるので特に注意してください。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：電源を切ったつもりでいた
- 人：アクセルレバーを誤って触ってしまった
- 人：乗降の際の危険についての説明が不足していた
- モノ：危険に対する注意喚起の表示が貼られていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 20

電源を切り忘れて、降りるときに本体が動き出し、転倒しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

降りようとハンドルに手をかけたところ誤ってアクセルレバーを押してしまい急発進、身体ごと持っていかれてしまった

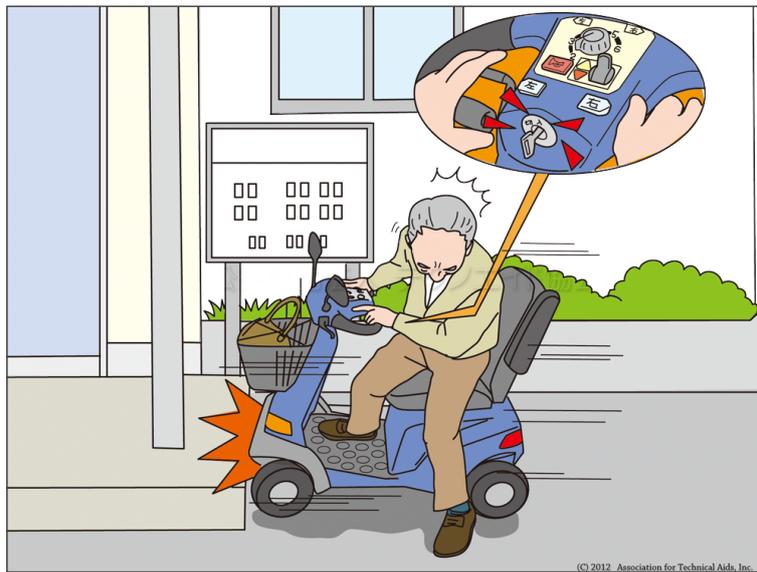

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ