


Case : 222

フットサポートの位置が低すぎたため、スロープにぶつかってしまう

場面の説明

車いすのフットサポートを極端に下げているため、スロープに乗り込む際にぶつかってしまった

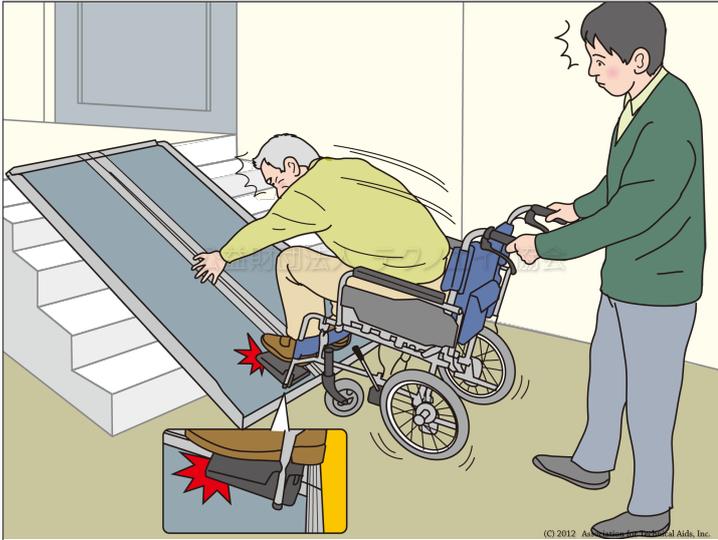

利用シーン	 移動  階段の昇り降り  外出
主な利用場所	 階段  玄関  段差・縁石
介護保険の種目	 スロープ
分類コード (CCTA95)	183015 (携帯用スロープ)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

スロープを利用する際には、実際に利用する傾斜において、フットサポートや転倒防止バーが干渉しないかどうか確認をすることが大切です。干渉する場合、車いすの調整やスロープ角度の緩和などで対策を講じます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：フットサポートを下げることによる影響を考えていなかった
 環境：スロープの角度が急だった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 222

フットサポートの位置が低すぎたため、スロープにぶつかってしまう


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

車いすのフットサポートを極端に下げているため、スロープに乗り込む際にぶつかってしまった

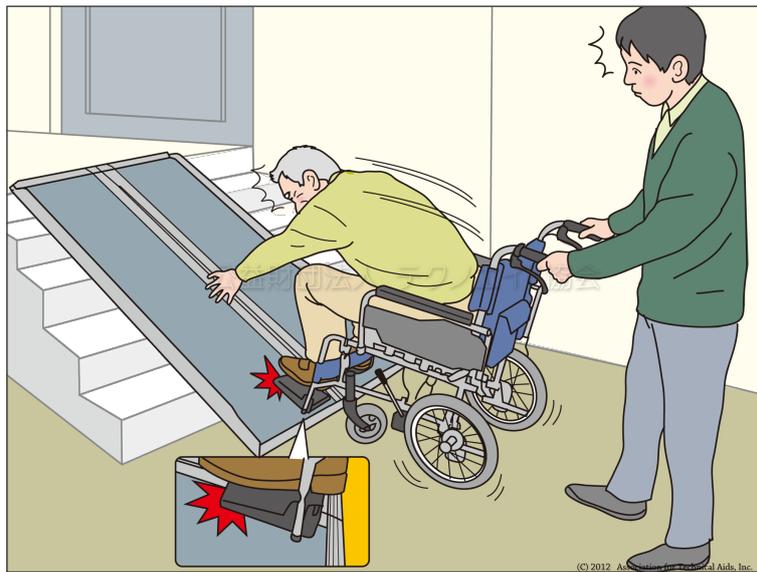

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ