

Case : 259

足を踏み外して転落しそうになる

場面の説明

足元をよく見ないまま、段差解消機のいすから降りたため、足を踏み外して転倒しそうになった



| | |
|----------------|---|
| 利用シーン |  移動 |
| 主な利用場所 |  玄関 |
| |  段差・縁石 |
| 介護保険の種目 |  移動用リフト（つり具の部分を除く） |
| 分類コード (CCTA95) | 183006 (段差解消機) |
| 介護テクノロジー | — |
| 二次元バーコード |  |

解説

玄関用のいす式昇降リフトは、上昇しながら上段の床に近づいていくように動きますが、厳密に、機構上床面の上に到達することはありません。そこで、安全に立ち座りができるよう床面に向けていすが回転するようになっていますが、事例ではこの回転が不十分であったようです。十分に回転すれば足は床の上につくのですが、回転が不十分であったので足が床から遠く、無理をして降りようとしてしまったのでしょう。「時間がかかる」「面倒くさい」と、基本の操作を怠ってしまうこともあります。そんな気持ちの陰にこそ「ヒヤリ・ハット」は潜んでいるものです。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：足元をよく見ていなかった
- モノ：いすの回転が不十分だった
- モノ：昇降高さが十分でなかった
- 環境：昇降リフトの性能に対して上り框段差が大きすぎた

| | | |
|-----|-----|-----|
| 日付： | 所属： | 氏名： |
|-----|-----|-----|

Case : 259

足を踏み外して転落しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

足元をよく見ないまま、段差解消機のいすから降りたため、足を踏み外して転倒しそうになった

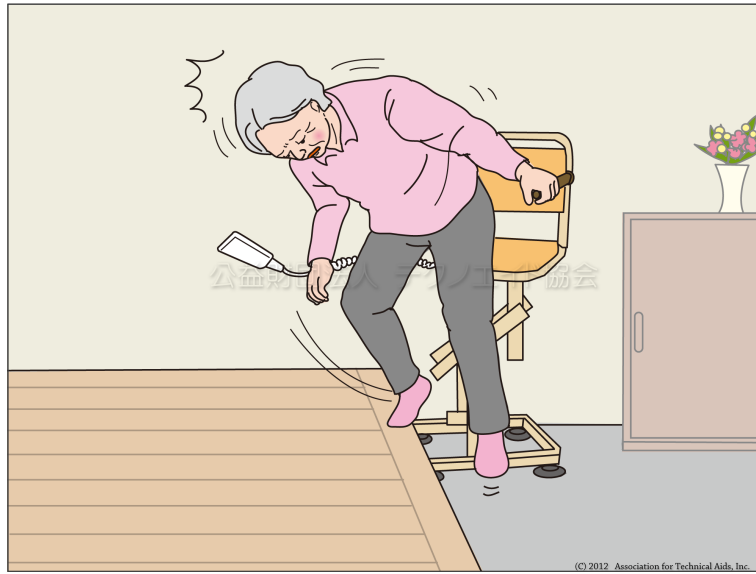

| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|------------------|------------------|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ