

Case : 285

振動でヘッドサポートの調整ねじがゆるみ、首が倒れそうになる

場面の説明

ヘッドサポートの調整ねじがゆるんでいたため、移動中の振動でヘッドサポートが倒れてしまった



利用シーン	 乗り物
主な利用場所	 車内
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122190 (姿勢変換機能付き車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

頻繁に調整をするので、普段からあまりねじをきつくは締めていなかったようです。報告された事例は、初めての介護タクシーでの移動中で、この経験をしてからは、移動前にねじを確認、締めなおすことを習慣にしているそうです。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：しっかりと調整ねじを締めていなかった

モノ：振動で調整ねじがゆるんでしまう

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 285

振動でヘッドサポートの調整ねじがゆるみ、首が倒れそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

ヘッドサポートの調整ねじがゆるんでいたため、移動中の振動でヘッドサポートが倒れてしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ