


Case : 309

片脚タイプのベッド用テーブルを使用中に背上げをしたら、本人が挟まれそうになる

場面の説明

テーブルを装着した状態で、介護者は背を下げる操作をするつもりだったが、ボタンを間違え上げてしまっていることに気が付かないまま、テーブルとベッドの間に本人が挟まれそうになった。

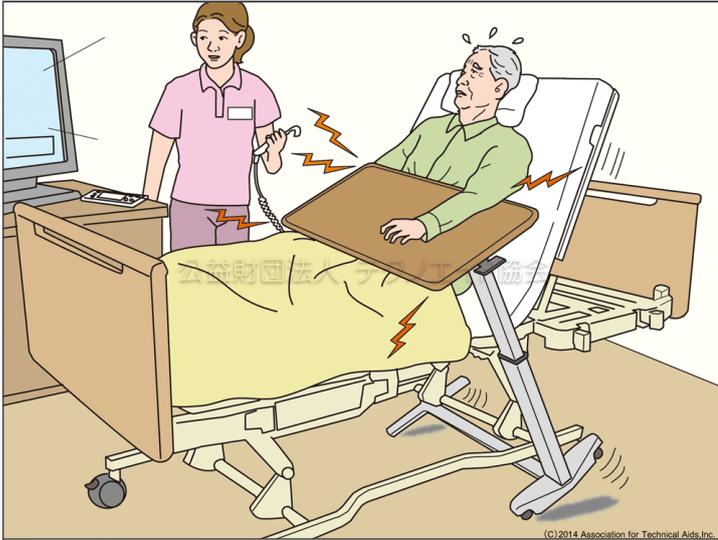

利用シーン	 起居・就寝  食事  リモコン操作
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台付属品
分類コード (CCTA95)	180315 (ベッド用テーブル)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

リモコン操作の最中は、本人の身体や用具の挙動から目を離すことは厳禁です。本人は危険を予知できない、または危険を知らせることができない場合もあります。また片脚式のテーブルでは、下からの力が加わるとテーブル面が上昇し、挟み込む力を軽減する機能を持つものもありますが、背上げのように偏った方向からの力ではその安全機能が作用しないケースもあります。安全機能が確実に効果を上げることが望まれますが、それに頼りきりにならない注意力も必要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：次の作業の準備に気を取られてしまっていた

モノ：操作ボタンの配置がわかりにくかった

環境：ベッドテーブルを外してからベッド操作をすべきであったが、部屋が狭くスペースが十分ではなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 309

片脚タイプのベッド用テーブルを使用中に背上げをしたら、本人が挟まれそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

テーブルを装着した状態で、介護者は背を下げる操作をするつもりだったが、ボタンを間違え上げてしまっていることに気が付かないまま、テーブルとベッドの間に本人が挟まれそうになった。

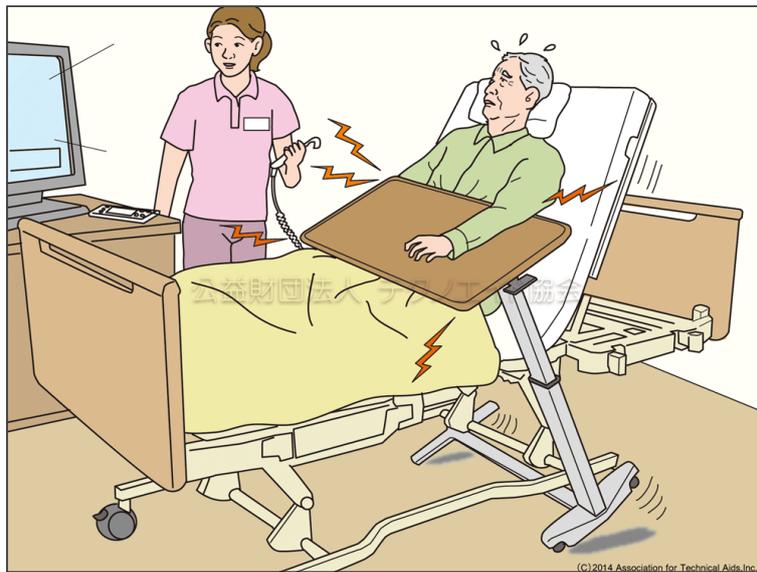

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ