

Case : 346

ロフトランド杖のカフから腕が抜けず転倒しそうになる

### 場面の説明

冬場で厚手のコートを着用して歩行しようとした際、足がもつれ、カフから腕が抜けず、杖先が右脛の動作を妨げ転倒しそうになった。



利用シーン	 移動
	 外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 歩行補助杖
分類コード (CCTA95)	120309 (ロフトランドクラッチ)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

ロフトランド杖の前腕カフの構造が、腕が抜けにくいタイプだったことや、冬場で服により腕が太くなっていたことにより起こりました。転倒時の危険性が高いため、腕が抜けにくいタイプは注意が必要です。旧式の円筒形型は販売禁止となっています。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：危険性を予見できていなかった
- モノ：前腕カフが腕が抜けにくいタイプだった
- 環境：冬で寒く、着ぶくれしていた
- 管理：腕が抜けにくいタイプは、転倒時に危険であるという注意喚起ができていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 346

ロフトランド杖のカフから腕が抜けず転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

冬場で厚手のコートを着用して歩行しようとした際、足がもつれ、カフから腕が抜けず、杖先が右脛の動作を妨げ転倒しそうになった。



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ