


Case : 38

マットレス止めが利用者の腿（もも）にあたり、ケガをしそうになる

### 場面の説明

マットレス止めが中央寄りに取り付けられていたため、ベッドで端座位になった際に、腿（もも）にあたった

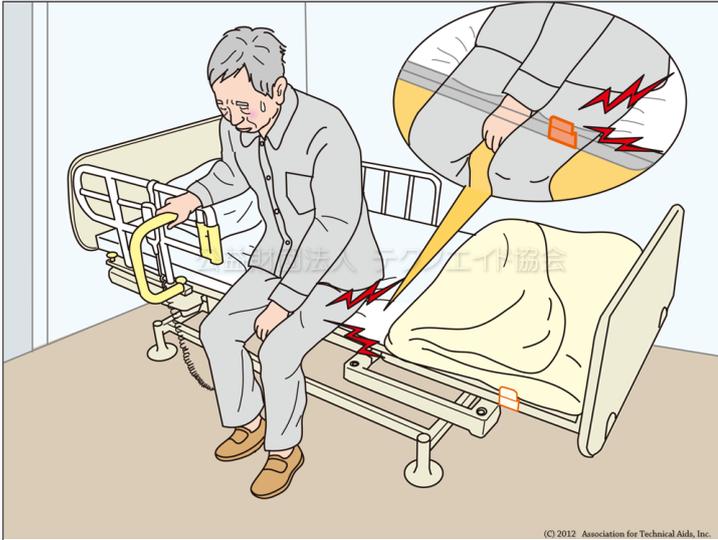

利用シーン	 起居・就寝  立ち座り
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

マットレス止めは正しく配置されていたのでしょうか？機種によっては、任意の位置に設置できるものもありますが、このようなことがないように配慮して設置すべきでしょう。またマットレスの厚さや硬さなどに起因することも考えられます。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：マットレス止めの位置を意識していなかった  
 環境：不適切な位置にマットレス止めを配置してある

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 38

マットレス止めが利用者の腿（もも）にあたり、ケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

マットレス止めが中央寄りに取り付けられていたため、ベッドで端座位になった際に、腿（もも）にあたった

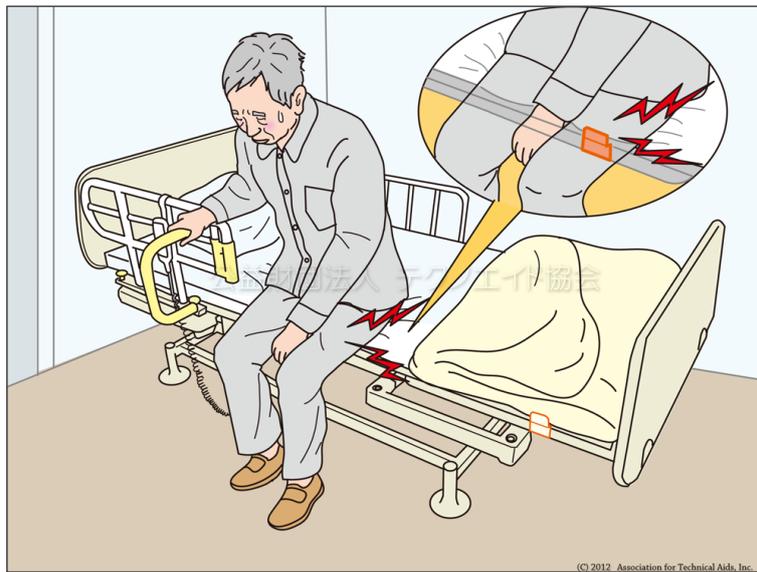

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ