


Case : 399

介護ベッドの背上げ機構部分の固定が外れ、背もたれが落下した

場面の説明

介護ベッドの背上げ機構のモーターと背の床板をつなぐ連結ピンが外れ、背上げの際に突然落下してしまう

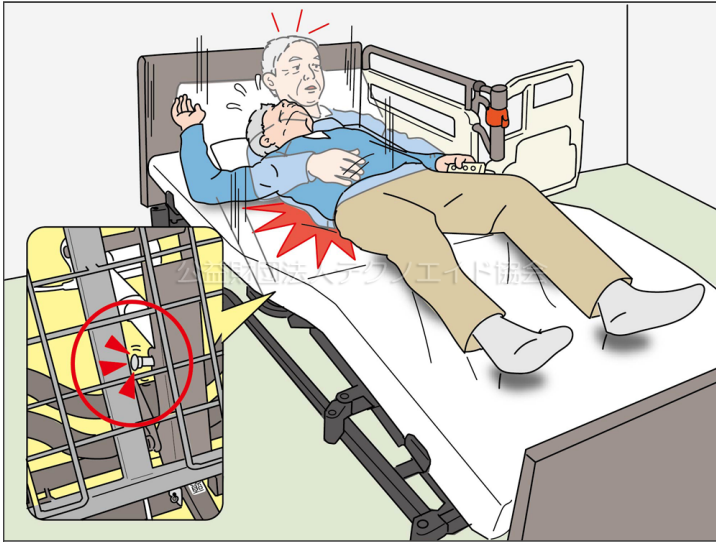

利用シーン	 起居・就寝
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

在宅用の介護ベッドは配送を考慮して組立式が採用されており、連結ピンによる接続を行う箇所が多くあります。このケースはこの連結ピンが脱落してしまったことが原因ですが、通常の使用状態では自然に脱落することは考えづらく、組み立てミスの可能性もあります。連結ピンの不具合は利用者には気づきにくい場所でもあり、福祉用具の貸与事業者には組立後の設置状況点検、動作確認等も含めた適切な管理・点検が求められます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：組立に不慣れにもかかわらず、説明書を読まなかった

モノ：連結ピンが外れかけていても、特に異音等が発生しない構造だった

管理：納品組立後の確認事項やモニタリングの際の点検項目に連結ピンの状態確認が含まれていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 399

介護ベッドの背上げ機構部分の固定が外れ、背もたれが落下した


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

介護ベッドの背上げ機構のモーターと背の床板をつなぐ連結ピンが外れ、背上げの際に突然落下してしまう

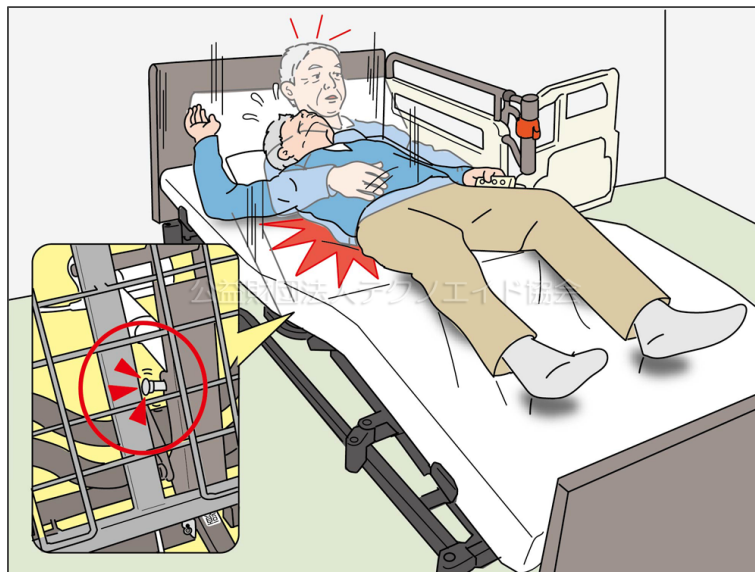

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ