


Case : 49

昇降レバーを誤ってさわってしまい、上に置いてあった食事が落ちそうになる

場面の説明

食事を乗せたベッド用テーブルを近づけようとして、誤って昇降レバーをさわってしまった

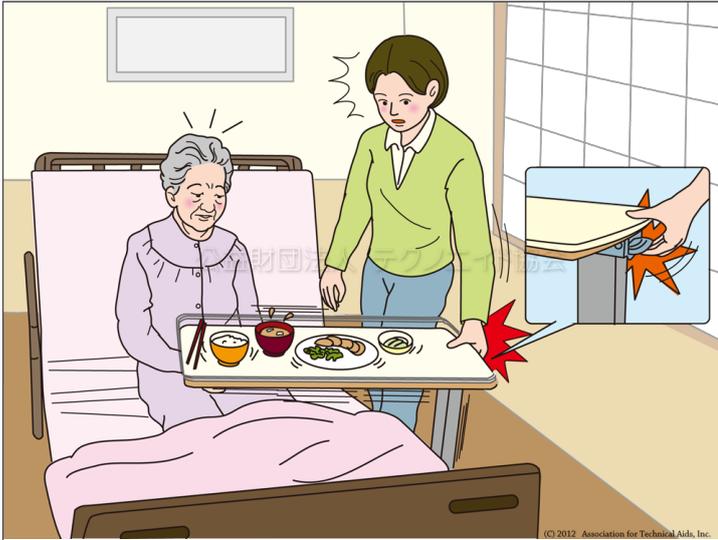

利用シーン	 食事
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 特殊寝台付属品
分類コード (CCTA95)	180315 (ベッド用テーブル)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

スプリング式のベッド用テーブルでは、簡単な片手操作でテーブルの上下が可能な反面、誤って昇降レバーなどに触れると急に上がってしまうことがあります。製品の特性をよく理解して使用することが大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：移動させる際に、誤って昇降レバーにさわってしまった
- モノ：下からの力で容易に上昇する構造のテーブルだった
- 環境：納品の際にこのような特性を説明してくれなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 49

昇降レバーを誤ってさわってしまい、上に置いてあった食事が落ちそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

食事を乗せたベッド用テーブルを近づけようとして、誤って昇降レバーをさわってしまった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ