

Case : 60

歩行器から片方の手を離し、便蓋を開けようとした時、バランスを崩しケガをしそうになる

### 場面の説明

歩行器を片手だけで支えた状態でポータブルトイレの蓋を開けようとしたため、バランスを崩し転倒しそうになった



利用シーン	 移乗  立ち座り  排泄
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 歩行器
分類コード (CCTA95)	120603 (歩行器)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

歩行器は4脚のフレームの中に身体を入れ、両手で支えて立位や歩行の安定を図る用具です。この事例のような片手での使い方は適切ではありませんので、床置き形手すりのような安定性の高い用具を利用してください。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：片手での使用が危険であることを認識していなかった  
 環境：ポータブルトイレがベッドから遠い位置に置かれていた

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 60

歩行器から片方の手を離し、便蓋を開けようとした時、バランスを崩しケガをしそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

歩行器を片手だけで支えた状態でポータブルトイレの蓋を開けようとしたため、バランスを崩し転倒しそうになった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ