

Case : 70

シルバーカーをエスカレーターで使用して、転倒しそうになる

場面の説明

シルバーカーを使用しながらエスカレーターに乗り、ブレーキをかけていたが、降り口で片側の解除が間に合わず、キャストが引っかかりバランスを崩した



| | |
|----------------|--|
| 利用シーン |  移動  外出 |
| 主な利用場所 |  エスカレーター |
| 介護保険の種目 | — |
| 分類コード (CCTA95) | 120690 (シルバーカー) |
| 介護テクノロジー | — |
| 二次元バーコード |  |

解説

エスカレーターでは、シルバーカーは折りたたみ、手に持って利用することが基本です。また、安全な利用のためには手すりにつかまることも必要ですので、立位や歩行の不安定な人の単独での利用は困難だと言えます。できるだけエレベータを利用し、やむを得ない場合は、シルバーカーを誰かに持ってもらうなど、安全な利用を心がけてください。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：シルバーカーを使用したままエスカレーターに乗れると思っていた
- 人：ブレーキの解除が間に合わなかった
- 環境：近くに安全に利用できるエレベータがなかった
- 管理：シルバーカーを押したまま乗り込むことの危険性をアナウンスしていなかった

| | | |
|-----|-----|-----|
| 日付： | 所属： | 氏名： |
|-----|-----|-----|

Case : 70

シルバーカーをエスカレータで使用して、転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

シルバーカーを使用しながらエスカレータに乗り、ブレーキをかけていたが、降り口で片側の解除が間に合わず、キャストが引っかかりバランスを崩した



| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|------------------|------------------|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 | |
| モノ（福祉用具）の要因 | |
| 環境の要因 | |
| 管理の要因 | |

メモ