

Case : 76

シルバーカーに足がついて行けず、前方へ転倒しそうになる

場面の説明

坂道で本体の進む速度に足がついていけなくなった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 坂道
介護保険の種目	—
分類コード (CCTA95)	120690 (シルバーカー)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

独力での歩行が不安定な人がシルバーカーのハンドルに過度によりかかっていたり、荷物を積んで重たくなっていることが考えられます。ブレーキ操作をするなど安全に利用してください。利用者の歩行能力によっては坂道の利用を控えることも必要です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：寄りかかり身体を支えてくれる道具だと思い込んでいた

人：坂道でも安全に移動できると過信していた

人：ブレーキ操作に慣れていなかった

環境：身体機能を確認し、シルバーカーが安全に使えるかどうか判断してくれる人が周囲にいなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 76

シルバーカーに足がついて行けず、前方へ転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

坂道で本体の進む速度に足がついていけなくなった



どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ