


Case : 82

車いすごとつり上げてしまい、バランスを崩し転落しそうになる

場面の説明

車いすのアームサポートにつり具を巻き込んでしまったことに気がつかなかった

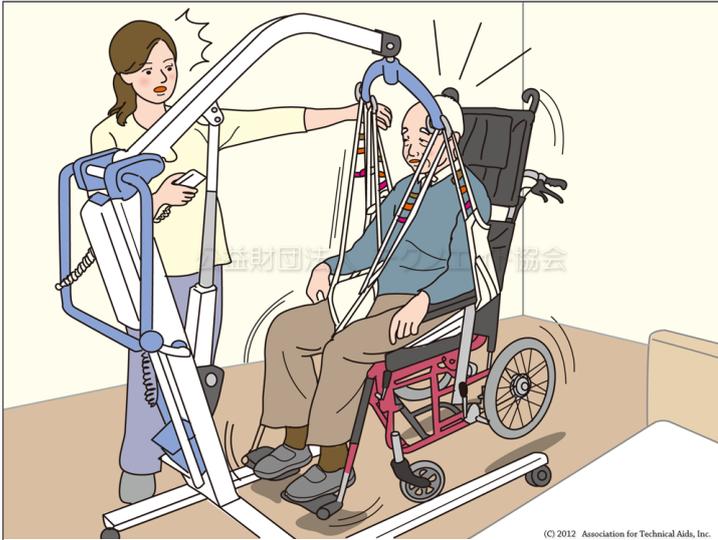

利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 移動用リフト（つり具の部分を除く）
分類コード (CCTA95)	123603 (吊り上げ式床走行リフト)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

アームサポートだけでなく、ブレーキレバーなどでも起こりうる事例です。つり具の装着後、確認をすることが重要です。万が一、巻き込んでしまっても、落ち着いて一度下げてからやり直すことで事故を防げます。つられた状態で巻き込みを外すことは危険です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：介助者がつり具や利用者をよく見ていなかった
- 人：つり始めにいったん停止して確認する手順を忘れていた
- 環境：つり具で巻き込みやすい形状のアームサポートの車いすを使用していた

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 82

車いすごとつり上げてしまい、バランスを崩し転落しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

車いすのアームサポートにつり具を巻き込んでしまったことに気がつかなかった

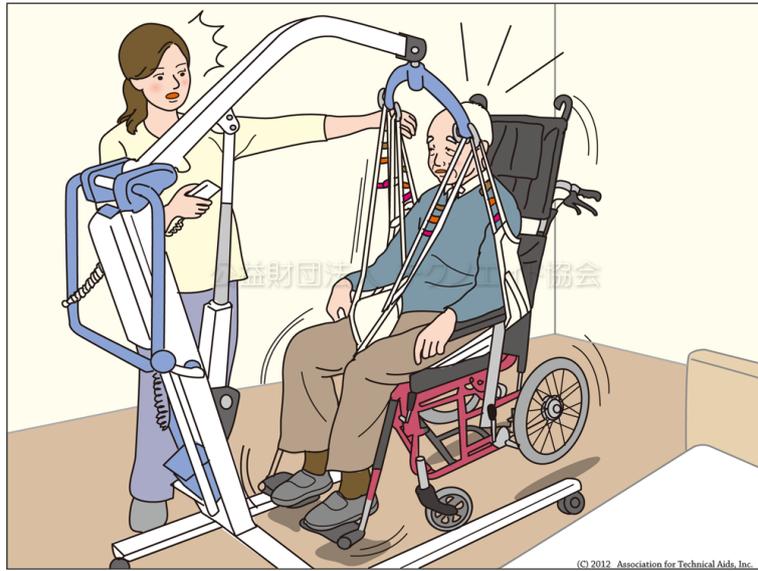

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ