


Case : 93

座面を回転させた際に、足がキャストにあたりケガをしそうになる

### 場面の説明

シャワーキャリーの足置きを跳ね上げており、足がぶらついた状態で座面を回転させてしまった

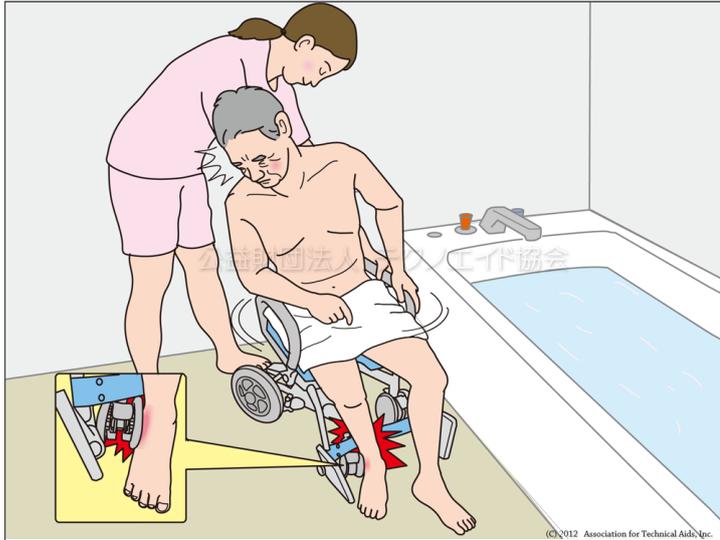

利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

座面が回転するなど、機能が多いシャワーキャリーでは、その分注意をするポイントも増えてきます。特に浴室内ではスペースが十分でなかったり、介助者から見えづらい箇所もあるなど危険が高まりますので、日ごろから危険箇所を意識し、十分注意して利用しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：介助者から利用者の足元が見えにくかった

モノ：足置きを跳ね上げた状態でも座面が回転する

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 93

座面を回転させた際に、足がキャストにあたりケガをしそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

シャワーキャリーの足置きを跳ね上げており、足がぶらついた状態で座面を回転させてしまった

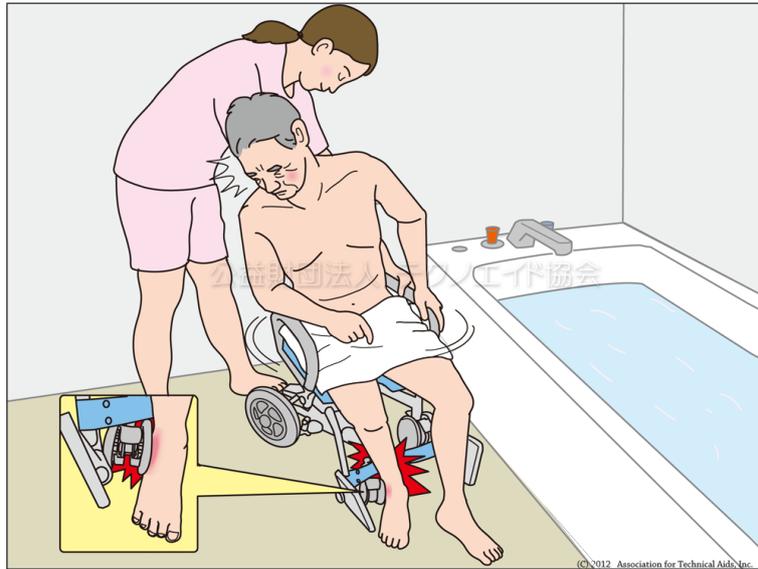

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ