


Case : 96

シャワーキャリーが動き、足を浴槽の縁にぶつけそうになる

場面の説明

ブレーキをかけ忘れていたため、シャワーキャリーが動いてしまった

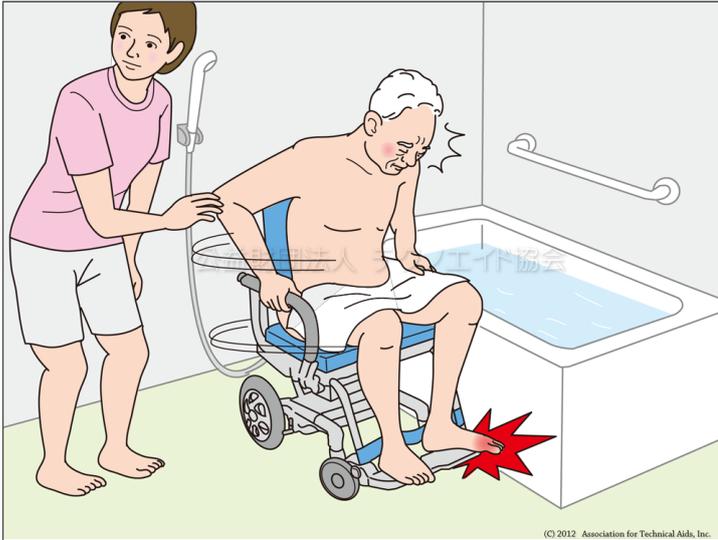

利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

洗い場には排水のための水勾配があるので、ブレーキをかけ忘れると容易に動いてしまいます。浴槽の縁にぶつかりそうになるほか、排水溝にキャスターが落ちるなどの危険があるので、ブレーキのかけ忘れやゆるみや劣化、破損に注意しましょう。水勾配が大きい場合は、すのこ等で調整しましょう。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：ブレーキをかけ忘れていた
- 人：利用者から目を離してしまった
- 環境：浴室にわずかな水勾配がある
- 管理：水勾配対策ができていなかった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 96

シャワーキャリーが動き、足を浴槽の縁にぶつけそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

ブレーキをかけ忘れていたため、シャワーキャリーが動いてしまった

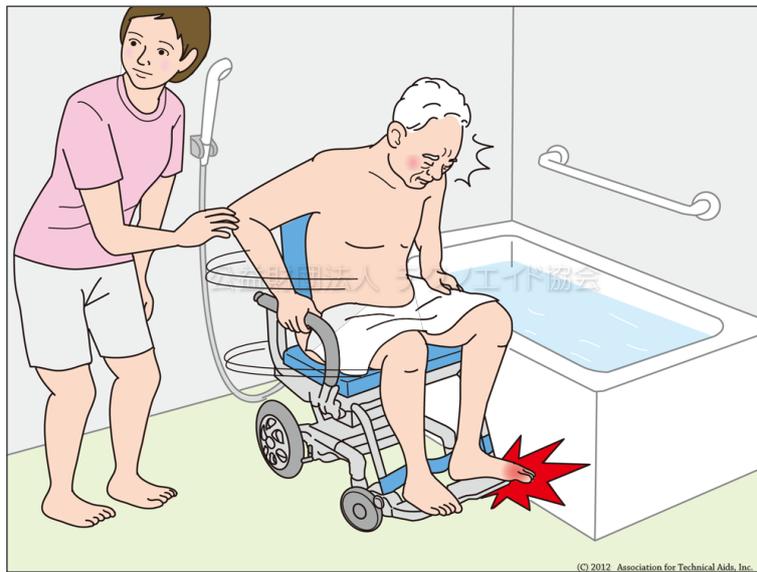

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ