
福祉用具ヒヤリハット 研修教材 (講師用)

Case: 96

シャワーキャリーが動き、足を浴槽の縁にぶつけそうになる

場面の説明

ブレーキをかけ忘れていたため、シャワーキャリーが動いてしまった

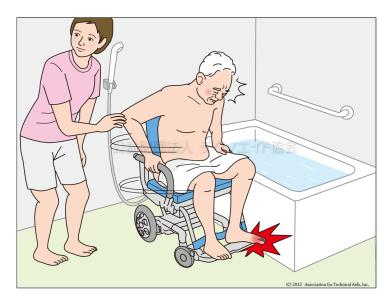

| 利用シーン | 入浴 | |
|-------------------|-----------------|--|
| 主な利用場所 | 浴室・脱衣所 | |
| 介護保険の種目 | 入浴補助用具 | |
| 分類コード (CCTA95) | 093303 (入浴用チェア) | |
| 介護テクノロジー | _ | |
| 二次元バーコード | | |

解説

洗い場には排水のための水勾配があるので、ブレーキをかけ忘れると容易に動いてしまいます。浴槽の縁にぶつかりそうになるほか、排水溝にキャスターが落ちるなどの危険があるので、ブレーキのかけ忘れやゆるみや劣化、破損に注意しましょう。水勾配が大きい場合は、すのこ等で調整しましょう。

参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:ブレーキをかけ忘れていた 人:利用者から目を離してしまった 環境:浴室にわずかな水勾配がある 管理:水勾配対策ができていなかった

福祉用具ヒヤリハット 研修教材(受講者用)

| 日付: | 所属: | 氏名: |
|--------|----------|---------|
| H 13 · | 7/1/-9 - | 27 11 . |


Case: 96

シャワーキャリーが動き、足を浴槽の縁にぶつけそうになる



場面の説明

ブレーキをかけ忘れていたため、シャワーキャリーが動いてしまった

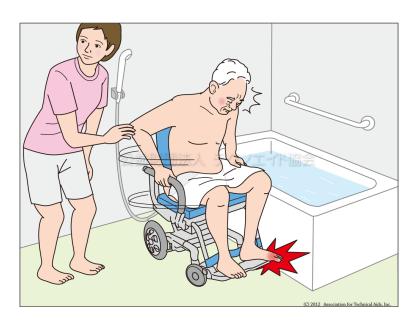

| どのような対策が必要でしょうか? |
|------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

メモ