


Case : 106

つり具を抜こうとして、前方へ落ちそうになる

場面の説明

利用者がずっこけ姿勢の状態、介助者が斜め前方からつり具を強引に抜こうとしたため、利用者もろとも動いてしまった

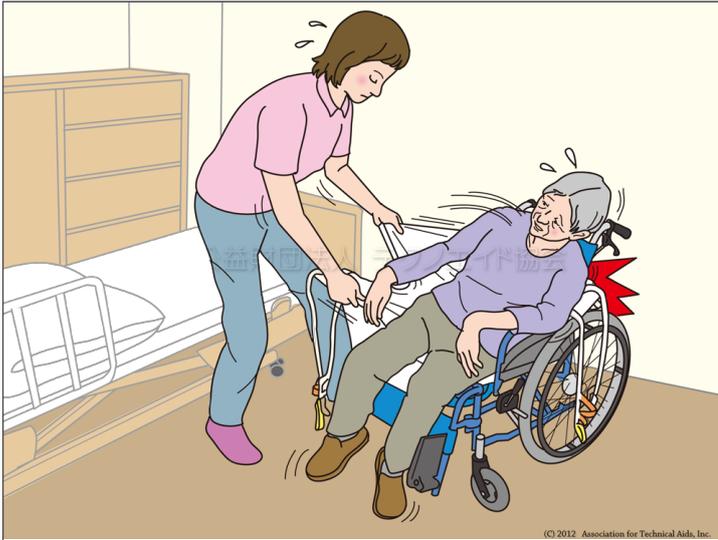

利用シーン	 移乗
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 移動用リフト（つり具の部分）
分類コード (CCTA95)	123621 (吊り上げ式リフト用吊具)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

つり具を正しく使用し、適切な操作方法で移乗すればこのようなことは起こりません。適切なつり具を選定し正しい操作方法を習得しましょう。自己流にならず手順通りに実施することを心がけてください。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：つり具を斜めから強引に引き抜いた

人：リフト移乗の正しい使用方法を教わっていなかった

管理：正しい操作方法を伝える研修機会が確保されていなかった