


Case : 117

前向きで下りたところフットサポートが地面にひっかかり、転落しそうになる

### 場面の説明

前向きで下りたため、フットサポートが地面にぶつかってしまった

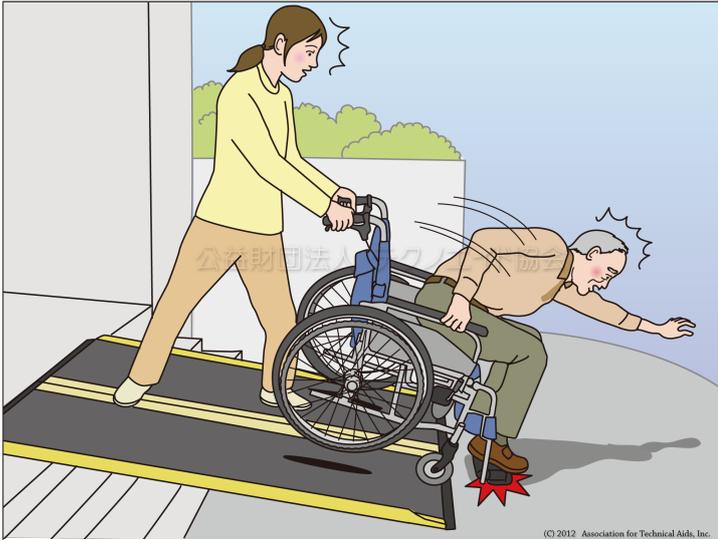

利用シーン	移動 階段の昇り降り 外出
主な利用場所	階段 玄関 段差・縁石
介護保険の種目	スロープ
分類コード (CCTA95)	183015 (携帯用スロープ)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

スロープを下りるときには、車いすを後向きに介助することが基本です。それは万が一このような事象が起こっても、利用者が転落することを防げるという観点からです。どうしても前向きに介助したい場合は、フットサポート下の隙間が路面に干渉しないことを確認しましょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：正しい介助方法を理解していなかった
- モノ：フットサポートが低い位置にある車いすだった
- 管理：ねじのゆるみからフットサポートが下がっていた