


Case : 215

ホースが折れ曲がっており、空気が流れなくなる

場面の説明

ポンプとマットをつなぐホースが途中で折れ曲がっていたため、空気が流れなくなっていた

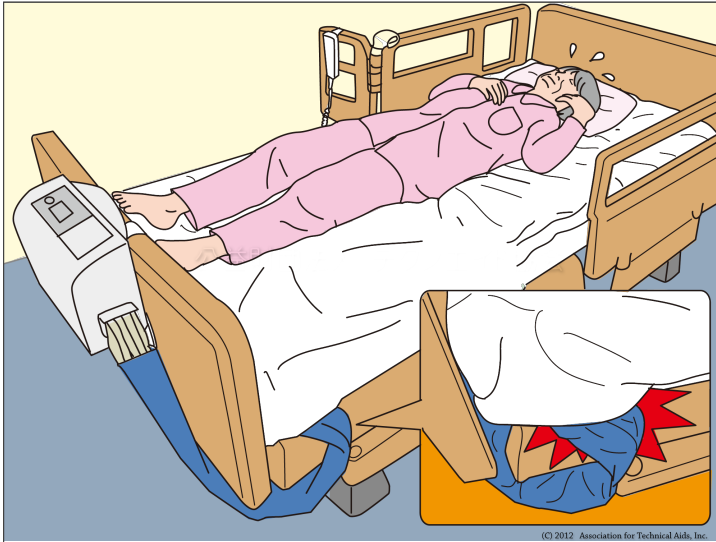

利用シーン	 起居・就寝
主な利用場所	 寝室
介護保険の種目	 床ずれ防止用具
分類コード (CCTA95)	033309 (特殊な褥瘡予防装置)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

この事例では、エアマットの取り扱いに不慣れな家族がシーツを交換した際に、ホースをシーツに巻き込んでしまったことが原因と報告されています。納品した事業者も、シーツ交換の際の注意事項を説明していなかったようです。福祉用具は、ほとんどの家族にとって初めて利用する道具です。スイッチなどの操作方法だけでなく、実際に使用する様々な場面を想定しての説明が求められます。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：シーツ交換の際、ホースをいっしょに巻き込んでしまった

管理：ホースの取り回しを日常的に確認していなかった