

Case : 224

手すりのベース部分に足をひっかけて、転倒しそうになる

### 場面の説明

手すりにつかまって歩こうとしたところ、すり足で歩いていたため、本体ベースの段差につまづき転倒しそうになった



利用シーン	 移動
主な利用場所	 廊下  段差・縁石
介護保険の種目	 手すり
分類コード (CCTA95)	123009 (床置き式起き上がり用手すり)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

特にすり足の高齢者の場合、ほんの2～3cmの段差でも足を引っかけてしまうことがあります。また、白内障など視覚の障害が起因して、段差を確認しづらい場合もあります。いずれにしても、段差を認識しやすい工夫をすることで、安全を高めることが可能です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：すり足で歩いていた
- 人：段差があることに気づいていなかった
- モノ：注意表示がなかった
- モノ：視力が衰えた利用者にはベースが見えづらい色だった