

Case : 243

片側のハンドルが急に下がり、転倒しそうになる

場面の説明

片側のハンドルが急に下がったため、バランスを崩して転倒しそうになった



利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 歩行器
分類コード (CCTA95)	120606 (歩行車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

なぜハンドルの高さが変わってしまったのでしょうか。普段の使用で固定ねじがゆるみ、片方が下がってしまったのかもしれません。このようなことがないように日常のメンテナンスは重要ですが、利用者がそのメンテナンスを行えない場合が多くありますので、家族などの協力もえて安全を確保する体制づくりも大切です。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：ハンドルの高さが合っていないことに気づかなかった
- 人：ねじのゆるみに気がつかなかった
- モノ：左右でハンドルの高さが変えられる歩行車だった
- 管理：定期メンテナンスをしていなかった