
福祉用具ヒヤリハット 研修教材 (講師用)

Case: 355

寝返りをした際にサイドレールを乗り越え転落しそうになる

場面の説明

マットレスとエアマットの間違った重ね使いのために、ベッド柵を越えて利用者が転落しそうになった

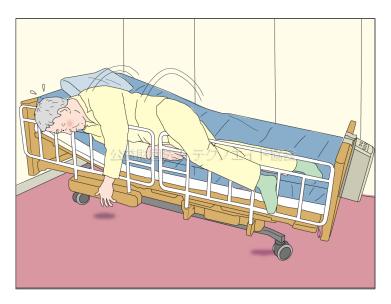

利用シーン	起居·就寝
主な利用場所	寝室
介護保険の種目	特殊寝台
分類コード (CCTA95)	181209 (電動ギャッチベッド)
介護テクノロジー	_
二次元バーコード	

解説

マットレスとエアマットの間違った重ね使いのために、ベッド柵を越えて利用者が転落しそうになった事例です。エアマットには、マットレスの上に重ねて使うオーバーレイタイプとマットレスなしで使うリプレイスタイプがあります。また、ベッド柵もマットレスの厚みに合わせた高いタイプもあり、それらの選定がうまくできていなかったことが原因です。

参考要因(要因の例であり、これだけが正解ということではありません)

人:危険を予見せず、背上げをしたままにしていた

人:リプレイスタイプのエアマットを重ね使いしないことを知らなかった

モノ:ベッド柵の高さの選定ができていなかった

管理:マットレスやベッド柵の正しい使い方の指導がされていなかった