


Case : 5

フットサポートが急に倒れ、身動きがとれず、前方へ転倒しそうになる

場面の説明

トイレへ立位移乗をしようとした時、フットサポートが急に倒れ、前方に倒れそうになった

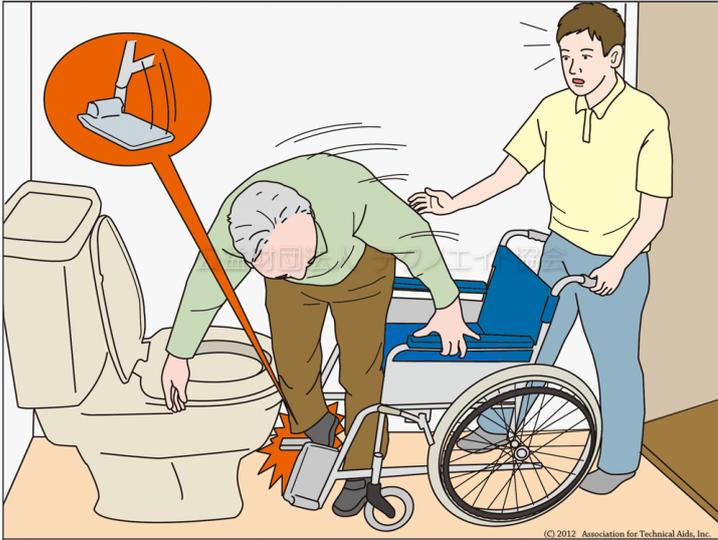

利用シーン	 移乗  排泄
主な利用場所	 トイレ
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122106 (後輪駆動式車いす)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

解説

大きなケガにつながるとても危険な事例です。通常フットサポートを跳ね上げた時は、ある程度の固さで保持されており、容易に倒れるものではありませんが、メンテナンス不足などで倒れやすくなる場合もあります。常に安全な状態に福祉用具を維持することにも注意を払うべきです。また、そもそもフットサポートの固定がゆるい機種もありますので、可能であれば機種を変更するなど、予防的な対策をすることもお勧めします。

参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- モノ：フットサポートの固定がゆるい機種だった
- 管理：フットサポートの定期的なメンテナンスを怠っていた