


Case : 85

段差解消機で昇降中に転落しそうになる

### 場面の説明

車いすのブレーキをかけ忘れてリフトを操作したところ、車いすが急に動き出した

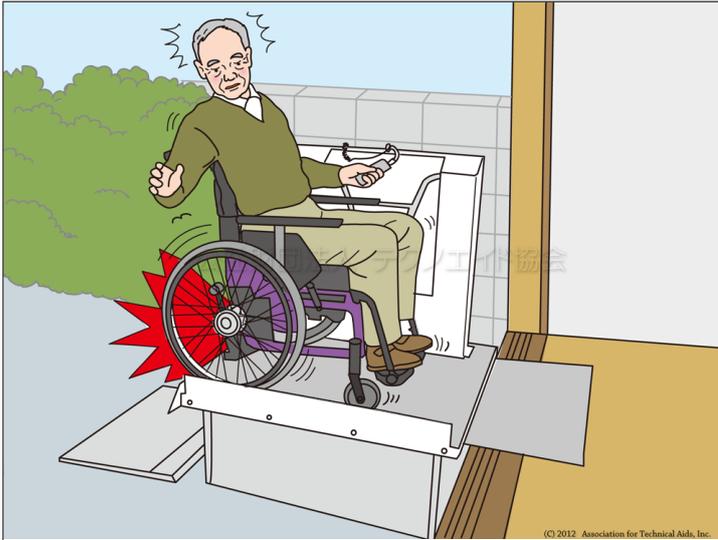

利用シーン	 移動
	 リモコン操作
主な利用場所	 玄関
介護保険の種目	 移動用リフト（つり具の部分を除く）
分類コード (CCTA95)	183006 (段差解消機)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

段差解消機のテーブル面はわずかに傾斜している場合が多いので、車いすのブレーキをかけることはとても重要です。うっかり忘れてしまうこともありますので、注意喚起のための表示を見やすいところにするなどの対策も有効でしょう。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

人：利用者があわてていてブレーキをかけ忘れていた  
 モノ：注意喚起の表示がなかった